



Por favor revisa el paquete de los lentes y su contenido antes de romper el sello. De esa forma podrás verificar si hay algún defecto en ellos.

**Después de abierto el empaque Love AF no realiza cambios.**



Por favor mantén presente la vida de uso de lentes, y cambios regularte.

**Expiran en un periodo de tiempo de 8 – 12 meses** con o sin formula médica.



**Lava y desinfecta** tus manos antes de tocar las lentillas, ya sea, antes de usarlos o al retirarlos de sus ojos.



Por ningún motivo laves los lentes con agua. Esto puede causar daños, infecciones o irritación en los ojos.



**Debes limpiar y desinfectar los Lentes con un líquido especial** que los consigues en un supermercado y/o farmacia.



Ponte los lentes antes de maquillarte o usar algún producto cosmético que deje residuos en tus manos.

Procura cambiar cada 3 o 4 meses los productos como mascara, delineadores, de esta forma evitaras que los lentes puedan llegar a contaminarse.



**Verifica las fechas de vencimiento de tus productos cosméticos.**

Retírate los lentes antes de desmaquillarte o usar algún producto que pueda irritar tus ojos y/o contaminarlos, ya que, esto evita futuras molestias.



**Antes de ir a dormir, coloca tus lentes en el estuche.**

Déjalos en el estuche de cuidado especial con el líquido limpiador.

**Nunca te acuestes a dormir o tomes siestas usando los lentes.**



**Si sientes dolor, irritación, inflamación o algún tipo de molestia cuando usas tus lentes**, examínalos y verifica que no presenta ninguna fisura o daño. Además, verifica su tiempo de uso.



Si las contrariedades continúan deja de usar los lentes y visita a tu doctor, si estas persisten.

**NOTHER**  
>Be yourself, like No other<